



Réparation Prothèse Mobile

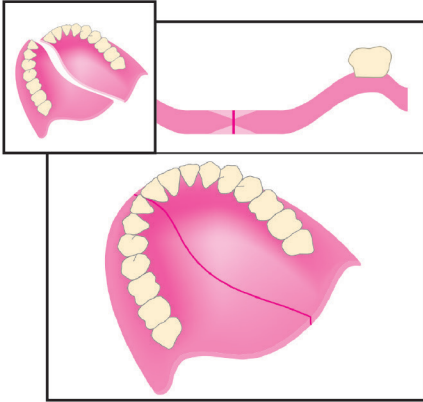


1- recoller la cassure ensemble et un modèle de basage.

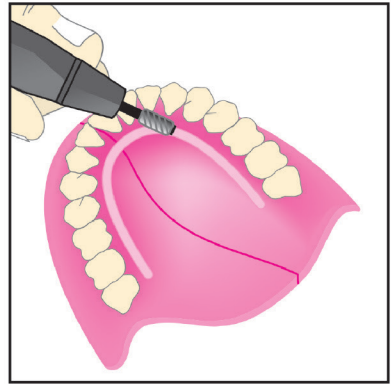


2- Utiliser une fraise cylindrique afin de réaliser une saignée de 2 mm tout le long du palatin.




3- Appliquer une fine couche de composite Fiberforce dans le canal.

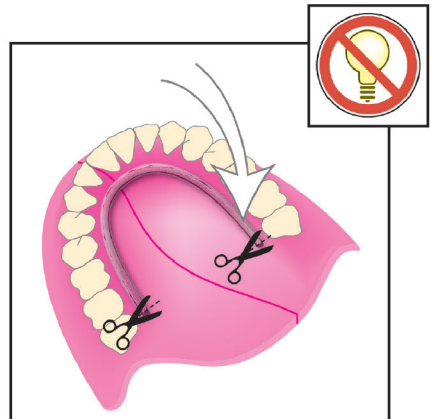


4- Couper la longueur nécessaire de fibre UD rose ou de tresse rose 2.2mm Fiberforce et la placer dans le canal.

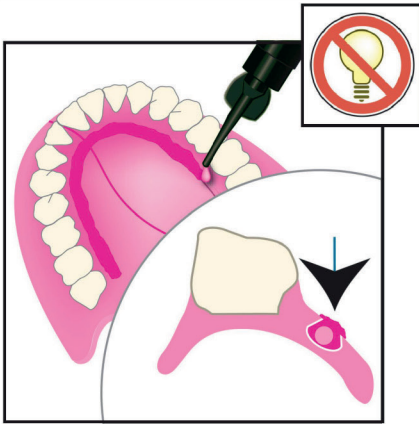

5- Appliquer une couche de composite Fiberforce en excès.

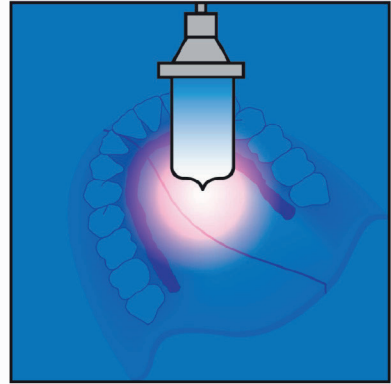

6- Photopolymériser.

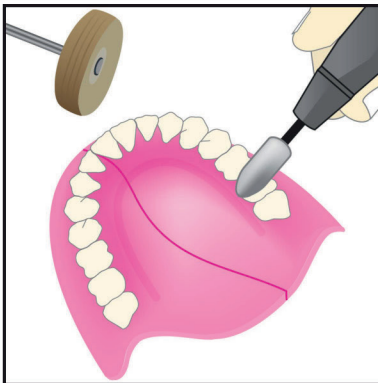

7- Fraiser et polir la surface réparée.

Dispositif médical pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la sécurité sociale. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Class : IIA (marquage CE délivré par SGS) CE1639.